



1-DAY ACUVUE® for ASTIGMATISM – 1-DAY ACUVUE® מגע עדשות כולל

לשימוש חד-יומי
מדריך הוראות למשתמש



מדריך לעדשות המגע שלך

Johnson & Johnson



תוכן עיניינים

	עדשות מגע ממותג <i>1-DAY ACUVUE® MOIST™</i> , <i>1-DAY ACUVUE® for ASTIGMATISM</i> – <i>1-DAY ACUVUE®</i>
4	
6	אזהרות – מה עליך לדעת אודות הרכבת עדשות מגע
8	שגרת נקיין
10	אריזת העדשות
11	הרכבת העדשות
14	מרכז העדשה בעין
16	הסרת העדשות
18	אם אזלו כל העדשות
19	הוראות לתיקון Monovision
20	בדיקת בטיחות
22	מידע חשוב נוסף
24	סיכום
25	המרשם שלך
26	מפתח סימנים



1-DAY ACUVUE® , 1-DAY ACUVUE® MOIST™ עדשות מגע ממותג **1-DAY ACUVUE® for ASTIGMATISM –I**

בטיחות, נוחות וקלות שימוש

איחולינו על הצטרפותך אל רבים ברחבי העולם הנהנים משימוש
1-DAY ACUVUE® , 1-DAY ACUVUE® MOIST™ נוח וקל בעדשות המגע
1-DAY ACUVUE® for ASTIGMATISM-I מתוצרת Johnson & Johnson
יצרנית עדשות המגע המובילה בעולם.

עדשות 1-DAY ACUVUE® for-I 1-DAY ACUVUE® , 1-DAY ACUVUE® MOIST™
ASTIGMATISM הינן רכות, דקות וגמישות, דבר ההופך אותן לנוחות כבר
מההתחלה, ומאפשר לחמצן להגיע לעיניים ולהותירן רעננות ובריאות.
עדשות המגע אף מספקות הגנה מפני קרינה אולטרה סגולית (UV).

לקלות שימוש, כל עדשה מסוג 1-DAY ACUVUE® MOIST™-I 1-DAY ACUVUE®
מכילה גוון היראות תכלכל כמו-טן כל עדשה מסומנת בסימון
פנים-חוץ המראה שהעדשה מונחת בכיוון הנכון ואינה הפוכה (ראה תמונה
בעמוד 11).

פריצת דרך בטכנולוגית הייצור היא זו שהביאה ליצירת עדשות באיכות גבוהה
כמו זו של 1-DAY ACUVUE® MOIST™ , 1-DAY ACUVUE®
1-DAY ACUVUE® for ASTIGMATISM-I בעלות נמוכה מספיק, המאפשרת החלפת
עדשות מדי יום. משמעות הדבר היא שהנך מחליף את העדשות לפני

הירידה בביצועי העדשות עקב משקעים ואפקט ההתיישנות ולא כתוצאה ממנה.
בכך שומרים על רמות גבוהות במיוחד של נוחות, ראייה ובריאות בכל יום ויום.



כמו כל סוג אחר של עדשות מגע, 1-DAY ACUVUE® MOIST™, 1-DAY ACUVUE® for ASTIGMATISM ו-1-DAY ACUVUE® הינן אביזר רפואי. התמיכה הרציפה באמצעות בדיקות עיניים סדירות של המומחה המטפל הינה חיונית להגנה ארוכת טווח על הבריאות ועל הראייה. בעת שימוש חד-יומי, אין צורך להשתמש בתמיסות ניקוי וחיתוי.

עדשות מגע ממותג 1-DAY ACUVUE® MOIST™, 1-DAY ACUVUE®, ו-1-DAY ACUVUE® for ASTIGMATISM – מומלצות לשימוש חד-יומי בלבד. הרכב זוג עדשות חדש בכל בוקר, וזרוק אותו בכל לילה. הדרך הבריאה והנוחה ביותר להרכיב עדשות מגע.



אזהרות – מה עליך לדעת אודות הרכבת עדשות מגע

ציות למומחה המטפל הינו חיוני לשימוש נכון בעדשות המגע. בעיות עם עדשות מגע עלולות לגרום לפגיעה רצינית בעין.

בעיות עיניים, לרבות כיבי הקרנית, עלולות להתפתח מהר ולגרום לאובדן הראיה. ממצאי מחקר¹ על עדשות מגע, מצביעים על הנקודות הבאות:

בקרב המרכיבים עדשות מגע לשימוש יומי (הרכבה ביום והסרה בלילה), השכיחות השנתית הכוללת של דלקת קרנית כיבית (כיב קרניתי) נאמדת ב-4.1 על כל 10,000, וב-20.9 על כל 10,000 בקרב המרכיבים אותן באופן רציף (ללא הסרה בלילה).

הסיכון להפגע מדלקת קרנית כיבית גדול פי 4 עד 5 בקרב המרכיבים עדשות מגע באופן רציף מאשר בקרב המרכיבים עדשות בשימוש יומי.

אם מוציאים מההשוואה את מרכיבי העדשות היומיות המרכיבים את העדשות גם בלילה ואת מרכיבי העדשות לשימוש רציף המחליפים את העדשות מדי יום, הסיכון בקרב מרכיבי העדשות באופן רציף גדול פי 10 עד 15.

כאשר מרכיבי עדשות לשימוש יומי ממשיכים להרכיבן בלילה (בניגוד להוראה המאושרת), הסיכון לדלקת קרנית כיבית בקרבם גדול פי 9 מאשר בקרב מרכיבי העדשות שאינם ממשיכים להרכיבן בלילה.

הסיכון להפגע מדלקת קרנית כיבית בקרב מרכיבי עדשות מגע מעשנים נאמד כגדול פי 3 עד 8 מאשר בקרב מרכיבי העדשות שאינם מעשנים.

ניתן להפחית את הסיכון הכולל להיפגע מדלקת קרנית כיבית באמצעות הקפדה על היגיינה נאותה ועל ההוראות להרכבת העדשות.

אזהרה: עדשות מגע הקולטות קרינה אולטר סגולית אינן תחליף לאמצעי הגנה קולטי קרינה אולטרה סגולית כמו משקפי מגן קולטי קרינה אולטרה סגולית או משקפי שמש, מכיוון שהן אינן מכסות לחלוטין את העין ואת האזור שמסביבה. עליך להמשיך להשתמש במגיני עיניים קולטי קרינה אולטרה סגולית על פי ההוראות.

הערה: חשיפה ממושכת לקרניים אולטרה סגוליות היא אחד מגורמי הסיכון למקרי קטרקט. החשיפה תלויה במספר גורמים, כמו תנאי הסביבה (קו גובה, איזור גיאוגרפי, עננות), גורמים אישיים (היקף הפעילות בשטח פתוח ואופייה). עדשות מגע חוסמות קרניים אולטרה סגוליות עוזרות בהגנה בפני קרינה אולטרה סגולית מזיקה. עם זאת, לא נערכו מחקרים קליניים, שיקבעו, כי הרכבת עדשות מגע החוסמות קרניים אולטרה סגוליות מקטינה את הסיכון להתפתחות מקרי קטרקט או ליקויי עיניים אחרים. למידע נוסף, היוועץ במומחה המטפל שלך.



שגרת נקיון

הכנת העדשות להרכבה

הניקיון הוא ההיבט הראשון והחשוב ביותר בטיפול נאות בעדשות מגע.

קבע לעצמך תנאים היגיינים לשגרת טיפול בעדשות:
● כדרך קבע, לפני שנוגעים בעדשות המגע, יש לרוחץ ידיים ביסודיות עם סבון עדין, לשטוף אותן בקפידה ולנגבן במגבת לא שעירה.

● לפני שנוטלים את עדשות המגע לידיים, אין להשתמש בתכשירים קוסמטיים שמנוניים, בסבונים המכילים שמנים קרים, בקרם לחות או במשחות. הטוב ביותר הוא להרכיב את עדשות המגע לפני איפור הפנים. תכשירים קוסמטיים על בסיס מים יהרסו את העדשות במידה פחותה מאשר המוצרים על בסיס שמן.



● יש לעצום עיניים בזמן השימוש בתרסיסי שיער או בתרסיסים אחרים.

● יש להיוועץ באיש מקצוע לגבי הרכבת עדשות המגע במהלך פעילות ספורטיבית.



**עדשה חדשה ורעננה
מדי יום**

- יש לציית באורח קבע להוראות המופיעות בחוברת זו, וכן לייעוץ הניתן על ידי מומחה המטפל לגבי החזקה, ההרכבה וההסרה הנכונות ולגבי השימוש הנכון בעדשות.
- לעולם אין להרכיב עדשות סגע מעבר לפרק הזמן המומלץ.



אריזת העדשות

לפתיחת הקופסה יש להניח אותה כששפת הפתיחה פונה קדימה, ולמשוך כלפי מעלה כדי לשבור את החותם. כל קופסה מכילה 30 עדשות המאורגנות ב-6 רצועות של 5 עדשות סטיריליות בודדות.

כל עדשה מונחת במארז משלה. הדבר מיועד באופן מיוחד כדי לשמור על סטיריליות. לסגירת הקופסה לשם אחסון, יש להכניס את שפת הפתיחה פנימה.

לפתיחת מארז של עדשה בודדת, יש לפעול על פי הצעדים הבאים:


1. ראשית, יש להפריד עדשה אחת מתוך הרצועה בת חמש העדשות שבתוך המארזים. יש להקפיד שלא לשבור את הסוגר במארזי העשות האחרים.
2. יש לנער את המארז כדי לאפשר לעדשות לנעו בחופשיות בתמיסה.
3. יש לקפל את נייר האלומיניום לאחור. לעיתים, עלולה עדשה להידבק לצד הפנימי של הנייר או לאריזה עצמה. הדבר לא יפגם בסטיריליות העדשה, והיא תהיה בטוחה לחלוטין לשימוש.
4. יש לאחוז בעדשות בזהירות בקצות האצבעות ולהזהר שלא להרוס אותן בציפורניים.
5. מומלץ לשמור על ציפורניים חלקות וקצרות. יש להוציא את העדשה בזהירות, על ידי החלקתה לעבר הצד העליון של המכל. לעולם אין להשתמש במלקטת או במכשירים אחרים.



הרכבת העדשות

למניעת בלבול, יש להתרגל להרכיב את העדשה הראשונה בעין ימין.
לפני הרכבת העדשה יש לבדוק שאין בה חריצים או קרעים. אם העדשה נראית פגומה, יש לזרוק אותה ולהשתמש בעדשה הבאה.
בדוק שהעדשה אינה הפוכה.
הנח את העדשה על קצה האצבע, והחזק אותה בגובה העין: הנך מביט עתה על קערית העדשה מבחוץ.

להרכבת 1-DAY ACUVUE® MOIST™ ו-1-DAY ACUVUE®

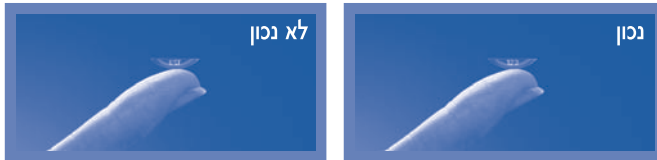

להרכבת 1-DAY ACUVUE® for ASTIGMATISM



עצות להרכבה קלה

קל לטפל בעדשות מנוגות ממותג 1-DAY ACUVUE® MOIST™, 1-DAY ACUVUE®, ו-1-DAY ACUVUE® for ASTIGMATISM אם מאפשרים להן להתייבש מעט: יש להניח אותן על אצבע יבשה, ולהשאיר אותן למשך 10-5 שניות.



אם תמתין מספר שניות, תגלה שהעדשה שומרת על צורתה טוב יותר, ושיהיה קל יותר לגלות אם היא מונחת הפוך או לא.

הערה: אם הנך צריך לשטוף את העדשה לפני הרכבתה על העין, השתמש אך ורק בתמיסת שטיפה סטרילית חדשה, על פי המלצת המומחה המטפל.

אין להשתמש במי ברז.

הרכבת העדשה על העין

- 1.** זכור להתחיל בעין ימין. לאחר שבדקת את העדשה והנך בטוח שאינה הפוכה, הנח אותה על קצה אצבעך.
 - 2.** הנחה את האמה של אותה יד קרוב לריסים התחתונות ומשוך את העפעף התחתון כלפי מטה.
 - 3.** השתמש באצבע או באמה של היד השניה כדי להרים את העפעף העליון והנח את העדשה על העין.
 - 4.** שחרר בעדינות את שני העפעפיים ומצמץ בעיניים.
 - 5.** חזור על צעדים אלה עם העדשה השמאלית.
- קיימות דרכים אחרות להרכבת העדשות. אם דרך זו קשה לך, יוכל המומחה המטפל להציע לך דרך חלופית.





מרכז העדשה בעין

בדרך כלל, העדשה ממרכזת את עצמה באופן אוטומטי באמצע העין בזמן הרכבתה. נדיר מאד שהיא תזוז לאזור הלבן של העין בזמן הרכבתה. עם זאת, דבר זה עלול לקרות אם ההרכבה וההסרה אינן מתבצעות בצורה נאותה. למרכז העדשה השתמש באחת הדרכים שלהלן:

מומלץ לסגור את העפעפיים, ובעדינות לעסות את העדשה ולכוון אותה למקומה דרך העפעף הסגור.

או: לתמרן את העדשה לכיוון מרכז העין, כאשר העין פתוחה, זאת באמצעות הפעלת לחץ של האצבע על קצה העפעף העליון או התחתון.

הערה:

- אם ראייתך מטושטשת לאחר הרכבת העדשה, מומלץ לבדוק כדלהלן:
- ייתכן שהעדשה אינה ממורכזת על העין. בדוק את ההוראות שלעיל.
 - אם העדשה נמצאת במקומה, הסר אותה וחפש את הסיבות הבאות:
 - א. תכשירי קוסמטיקה או שמנים על העדשה. יש לזרוק את העדשה ולהרכיב עדשה חדשה.
 - ב. ייתכן שהעדשה מורכבת על העין הלא נכונה.
 - ג. ייתכן שהעדשה הפוכה, ואז תהיה נוחה פחות מהרגיל.

טיפול בעדשה שנדבקה (לא זזה)

אם העדשה נדבקה לעין, יכול המומחה המטפל לרשום לך תמיסה שמנונית או תמיסה להרטבת העין. כך תוכל להרטיב את העדשות כאשר הן מורכבות על העיניים, כדי שתהיינה נוחות יותר.

טפטף מספר טיפות בלבד עד שהעדשה תתחיל לזוז בחופשיות על העין. אם דרך זו אינה פותרת את הבעיה, היוועץ **מיידי** במומחה המטפל.





הסרת העדשות

תמיד הסר את אותה עדשה ראשונה.

רחץ, שטוף ונגב את ידיך ביסודיות וציית לאותם כללי היגיינה שתוארו בסעיף 'שגרת נקיון'.

שים לב:

לפני שתנסה להסיר את העדשה, ודא תמיד שהעדשה נמצאת במרכז העין.

תוכל לקבוע זאת אם ראייתך מטושטשת, כאשר הנך מכסה את העין השנייה. במצב זה העדשה נמצאת על האשור הלבן של העין או אינה נמצאת על העין כלל. למציאת העדשה, בדוק את האזור העליון של העין באמצעות הסטת המבט כלפי מטה לעבר מראה ומשיכת העפעף העליון כלפי מטה.

בדוק את האיזור התחתון של העין באמצעות משיכת העפעף התחתון.

לאחר שמצאת את העדשה, תוכל להסיר אותה באצמעות 'שיטת הצביטה' או בדרך אחרת על פי המלצת המומחה המטפל.

שיטת הצביטה

1. הבט מעלה, החלק את העדשה כלפי מטה באצבע לעבר האזור הלבן של העין.
2. צבוט בעדינות את העדשה בין האגודל לאצבע והסר אותה.





אם אזלו כל העדשות

חשוב לוודא שברשותך תמיד כמות מספקת של עדשות להחלפה.

כדי להמנע ממצב, שבו אזלו כל העדשות, תצטרך לדאוג להזמין מראש, עדשות חדשות, מהמומחה המטפל.

עדשות מגע ממותג 1-DAY ACUVUE® , 1-DAY ACUVUE® MOIST™ , מיועדות לשימוש חד-יומי בלבד. אין להשתמש במוצרים אחרים (שאינם תמיסות שטיפה או הרטבה) לטיפול בעדשות.

אם אזלו העדשות שלך מסיבה כלשהי, הרכב משקפיים.

למרות ש 1-DAY ACUVUE® MOIST™ , 1-DAY ACUVUE® , ו-1-DAY ACUVUE® for ASTIGMATISM הוא מותג עדשות המגע המועדף שלך לתיקון ראייה, משקפיים הם גיבוי חיוני לכל מרכיבי עדשות המגע.

הוראות לתיקון Monovision

אם המומחה המטפל מסביר לך הנך זקוק לתיקון Monovision, עליך לשים לב לנקודות הבאות:

כמו בכל סוג של תיקון עדשה, תיתכן התפשרות בראייה.

יש מקרים שבהם עדשות Monovision מפחיתות את חדות הראייה ואת תפיסת העומק למרחק ולעצמים קרובים. יש מטופלים שקשה להם להתרגל לכך.

תסמינים כמו שטטוש קל ואיכות ראייה משתנים עלולים להימשך זמן קצר או מספר שבועות, עד שהעיניים מסתגלות. ככל שתסמינים אלה נמשכים זמן רב יותר, כך פוחת הסיכוי להסתגלות מוצלחת.

בפרק זמן זה מומלץ להרכיב עדשות אלה רק במצבים מוכרים, שאינם מצריכים ראייה מאומצת. לדוגמא, עד שעיניך תסתגלנה, מומלץ לא לנהוג.

יש מטופלים, שעליהם להרכיב את משקפיהם על העדשות כדי שתהיה להם הראייה הברורה ביותר במשימות קריטיות.

- יש מקרים, שבהם למטופלים לעולם לא יהיה נוח לפעול באור דל, בזמן נהיגה בלילה, למשל. במקרה זה, ייתכן שתירשמנה לך עדשות נוספות, כך ששתי עיניך תוכלנה להיות מתוקנות כאשר נדרשת ראייה חדה יותר למרחק.
- ההחלטה להרכיב עדשות Monovision צריכה להתקבל תמיד לאחר היוועצות קפדנית עם המומחה המטפל.
- עליך לציית לעצה שתקבל כדי לסייע לך בהסתגלות לעדשות Monovision ועליך לדון תמיד בכל דאגה ובעיה שעלולה להתעורר במהלך תקופת ההסתגלות ולאחריה.



בדיקת בטיחות

עליך לבצע בדיקה עצמית פשוטה לפחות פעם ביום.
שאל את עצמך:

1. כיצד אני מרגיש עם העדשות בעיניים?
2. איך נראות עיניי?
3. האם אני ממשיך לראות היטב?

עליך להסיר את העדשות מייד אם הנך נתקל באחת מהבעיות הבאות:

- תחושה של גירוי, בעירה ועקצוץ בעיניים.
- תחושה כאילו יש משהו בתוך העין.
- יתר רטיבות בעין, הפרשות חריגות מהעין או אדמומיות העין.
- ראייה מטושטשת, ראיית צבעי קשת או הילה מסביב לחפצים.
- יובש בעין עלול להיווצר כתוצאת מהרכבת עדשות רצופה או לפרק זמן ארוך מידי.
- תחושה שהעדשות נוחות פחות מאשר כשהורכבו לראשונה.

אם אי הנוחות או הבעיה נעלמים כאשר הינך מסיר את העדשה, עליך לבדוק היטב אם העדשה ניזוקה, או שיש עליה לכלוך או גוף זר. אם זה המצב השלך את העדשה לאשפה והרכב עדשה טרייה חדשה.

אם הבעיה נמשכת, הסר את העדשה החדשה והיוועץ מייד עם המומחה המטפל.

כל אחד מהתסמינים שלעיל יכול להעיד על מצב חמור, כגון דלקת או כיב הקרנית. אבחנה מיידית וטיפול חיוניים למניעת נזק חמור לעיניים.

זכור: תסמינים הם סימני אזהרה. אם יש ספק, הסר את העדשות.



מידע חשוב נוסף

אמצעי זהירות

- בעת השימוש בעדשות מגע צבעוניות, אתה עלול לחוש בשינוי זמני של הראייה עקב נוכחות הצבע בעדשה, במיוחד בתנאים של תאורה חלשה.
- אם השינוי בראייה נמשך בעת הרכבת 1-DAY ACUVUE® for ASTIGMATISM חשוב להתייעץ עם המומחה המטפל.
- לפני שתיפרד מהמומחה המטפל, ודא שהנך יכול להסיר את העדשות.
- הסר מייד את העדשות אם עיניך נעשות אדומות או אם הנך סובל מגירוי בעיניים.
- יידע את הרופא שלך על כך שהנך מרכיב עדשות מגע.
- לפני השימוש בטיפות עיניים, התייעץ תמיד במומחה המטפל שלך.
- תרופות מסוימות, כגון אנטיהיסטימינים, תרופות נגד גודש, תרופות משתנות, מרפי שרירים, תרופות הרגעה וטיפול נגד הקאות בזמן נסיעה, עלולות לגרום ליובש בעיניים, למטרד ולראייה מטושטשת. אם הנך נתקל בבעיה, עליך לקבל ייעוץ רפואי מתאים.
- אם חומרים כימיים ניתזו על עיניך: **שטוף מייד את העיניים במי ברז. התקשר אל המומחה המטפל שלך ללא דיחוי, או גש למחלקת המיון בבית-החולים הקרוב לביתך.**
- מי שנטלת גלולות למניעת הריון, עלולה לפתח שינויים בראייה או בסבילות לעדשות. המומחה המטפל יכול לייעץ לך מה לעשות.

- בדומה לכל עדשות המגע, בדיקות עיניים סדירות הן חיוניות לשמירה על ראייה תקינה.
- לראייה תקינה ונוחה, חשוב להרכיב את עדשות המגע 1-DAY ACUVUE® MOIST™, 1-DAY ACUVUE® for ASTIGMATISM או 1-DAY ACUVUE® בהתאם להוראת המומחה המטפל. עדשות אלה מיועדות להרכבה חד-יומית, עם סיום הרכבתן יש לזרוק אותן, חוברת זו מהווה תזכורת להוראות אלו.
- עליך ליידע את המומחה המטפל על ההיסטוריה הרפואית שלך. הוא ימליץ לך על עדשות מגע ותמיסות טיפול המתאימות לצרכים האישיים.
- שאל את המומחה המטפל שלך לגבי הרכבת עדשות מגע בעת שחיה או ספורט מים אחר. חשיפת עדשות המגע למים במהלך שחיה או בעת שהיה באמבט חם עלולה להגדיל את הסיכון לזיהום חיידקי בעין.
- המגע מאדים מזיקים ומפיח בזמן הרכבת העדשות.
- אם יש לך שאלות שאל תמיד את המומחה המטפל שלך.



סיכום

כמו בכל סוג אחר של עדשות מגע, יש לפעול עפ"י הנחיות בסיסיות כדי להגן על הראיה ולשפרה.

- חשוב לציית להוראות שניתנו לך להרכבה בטוחה. בדיקות עיניים סדירות חשובות לשמירה על ביצועים מעולים ועל ראיה תקינה.
- חשוב לשמור על רמת היגיינה גבוהה.
- אין להירדם עם העדשות בעיניים, יש להסירן מדי לילה.
- יש להרכיב אך ורק עדשות סטריליות חדשות.
- **אין להשתמש** במי ברז לשטיפת העדשות.
- אין להרכיב את העדשות מעבר לפרק הזמן המומלץ.
- אם נתקלת בבעיה כמו אדמומיות, גירוי או ראיה מטושטשת, הסר מייד את העדשות והתקשר למומחה המטפל שלך.
- תמיד החזק זוג משקפיים בקרבת מקום, כדי שלא תפתה להרכיב את העדשות כאשר אסור לך. אמנם העדשות עשויות להיות האמצעי המועדף עליך, אך המשקפיים הם בבחינת גיבוי.

כמרכיב עדשות מגע חד-יומיות מסוג 1-DAY ACUVUE® MOIST™, תוכל לזהות במהרה את יתרונותיהן על פני משקפיים או עדשות מגע אחרות.

להפקת המרב וכדי לשמור על הביצועים הטובים ביותר, חיוני להבין עד כמה חשוב לפעול על פי ההנחיות.

עליך להרכיב את העדשות רק לאחר קבלת ייעוץ מהמומחה המטפל שלך ולאחר עיון בהוראות הכלולות בחוברת זו.

תופעות לוואי

בכל מקרה של תופעת לוואי בעת השימוש בעדשות המגע ממותג 1-DAY ACUVUE® for ASTIGMATISM-I 1-DAY ACUVUE®, 1-DAY ACUVUE® MOIST™ יש לדווח למומחה המטפל.



המרשם שלך

עדשות מגע 1-DAY ACUVUE®, 1-DAY ACUVUE® MOIST™ ו-1-DAY ACUVUE® for ASTIGMATISM

עדשה ימנית
..... (צבע) עוצמה וקימור בסיס
עדשה שמאלית
..... (צבע) עוצמה וקימור בסיס

עדשות מגע 1-DAY ACUVUE®, 1-DAY ACUVUE® MOIST™ ו-1-DAY ACUVUE® for ASTIGMATISM מיועדות לשימוש חד-יומי בלבד.

אם יש לך שאלות או דאגות, התקשר אל המומחה המטפל שלך.

כתובת ומספר טלפון של המומחה המטפל שלך
.....
.....
.....

חשוב לבקר בקביעות אצל המומחה המטפל כדי להבטיח עיניים נקיות ובריאות.

תורים למעקב טיפול	
..... 1 4
..... 2 5
..... 3 6

מפתח סימנים

ראה עלון הוראות	
תאריך אחרון לשימוש (תאריך תפוגה)	
קוד אצווה	LOT
סטריילי באמצעות אדים או חום יבש	STERILE 
קוטר	DIA
קימור בסיס	BC
דיופטר (חוזק העדשה)	D
מרכז העובי	CT
סימן אישור מערכת איכות	CE 0086
חסימת קרניים אולטרה סגוליות	
קילוף נייר האיטום	
גוון היראות: כיוון העדשה נכון	
גוון היראות: העדשה הפוכה	
ניהול אשפה בתשלום	
אזהרה: חוק פדרלי בארה"ב מגביל מוצר זה למכירה ע"י או עפ"י הוראתו של מומחה עיניים מורשה.	Rx Only
עוצמת הצילינדר	Cyl
זווית	Axis

קיבלתי הסברים על מגוון סוגי עדשות
המגע ועל זמני הרכבתן.

קראתי את העצה לעיל, ואני מקבל/ת
על עצמי את האחריות לציית להמלצות.

שם

חתימה

תאריך



Johnson & Johnson Vision Care

ג'ונסון אנד ג'ונסון ויזן קר, מחלקה של גיי-סי הלת' קר בע"מ
שפיים, 60990

טל. 09-959-1153, פקס. 09-958-6880

דואר אלקטרוני: oponte@jnjil.jnj.com

www.acuvue.co.il

ACUVUE®, ACUVUE® MOIST® and ACUVUE® for ASTIGMATISM are trademarks of Johnson & Johnson Vision Care. ©JVC 2006, Johnson & Johnson Vision Care is a division of J-C Health Care Ltd.